

Phadebact® GC Positive Controls

53-1141-03, May-12

Mode d'emploi

MKL Diagnostics AB
Kung Hans Väg 3
192 68 Sollentuna
Sweden



MKL Diagnostics

BUT DU DOSAGE

Phadebact® GC Positive Controls est une trousse permettant d'effectuer un contrôle de qualité lors de l'identification de *N. gonorrhoeae*. Chaque flacon contient un extrait de culture pure dont la spécificité est indiquée sur l'étiquette du flacon.

La trousse s'utilise de préférence avec le Phadebact® Monoclonal GC Test.

RÉACTIFS

Chaque trousse de Phadebact® GC Positive Controls comporte deux flacons de 1,2 mL contenant chacun un extrait de culture pure de *N. gonorrhoeae*, des sérogroupes WI ou WII/WIII indiqué sur l'étiquette du flacon.

Les taux d'antigènes ont été ajustés afin d'obtenir une réaction optimale avec les réactifs d'identification. Deux bouchons compte-gouttes sont inclus dans la trousse.

Précaution

Pour usage *in vitro* uniquement.

Attention! Les réactifs contiennent comme conservateur de l'azide de sodium (NaN_3) qui peut réagir avec le plomb et le cuivre des tuyauteries pour former des azides métalliques fortement explosifs. Au moment d'éliminer les réactifs, rincer abondamment pour éviter la formation de ces composés explosifs. Les contrôles ont été testés négatifs pour la croissance des Gonocoques.

Préparation des contrôles

Les réactifs de Phadebact® GC Positive Controls sont prêts à l'emploi. Enlever la capsule protectrice de chaque flacon et la remplacer par un bouchon compte-gouttes.

Conservation

La date de péremption est indiquée sur l'étiquette extérieure de la trousse et sur les étiquettes des flacons. Il est recommandé de conserver la trousse entre 2-8°C. Ne pas congeler les réactifs.

METHODE

Les contrôles positifs s'utilisent dans le cadre des procédures de contrôle de qualité des méthodes d'identification sérologique. Utiliser une anse jetable pour mélanger la goutte de contrôle avec celle du réactif correspondant sur la carte d'agglutination.

Matériel nécessaire

Aucun matériel supplémentaire par rapport au réactif Phadebact® Monoclonal GC Test.

RÉSULTATS

Les réactions positives et négatives sont lues conformément au mode d'emploi du Phadebact® Monoclonal GC Test ou de la méthode utilisée.

LIMITES DU TEST

Si une réaction positive n'apparaît pas clairement lors de la réaction entre le contrôle positif et un réactif qui lui est spécifique, cela indique que soit le contrôle, soit le réactif ne sont pas conformes. Dans ce cas, il est nécessaire de déterminer quel est le produit déficient et de le remplacer.

GARANTIE

Les résultats présentés ici ont été obtenus en suivant exactement le protocole décrit. Tout changement ou modification dans ce protocole non recommandé par MKL Diagnostics AB peut affecter les résultats, auquel cas MKL Diagnostics AB décline toute responsabilité exprimée, implicite ou établie par la loi, y compris la responsabilité impliquée par la vente ou le transport pour son utilisation. MKL Diagnostics AB dans une telle éventualité ne peut être rendue responsable des dommages indirects ou conséquences en résultant.

PRODUITS

Phadebact® COA System

Phadebact® Streptococcus Tests
Phadebact® Streptococcus Respiratory Test
Phadebact® Strep A Test
Phadebact® Strep B Test
Phadebact® Strep D Test
Phadebact® Strep F Test
Phadebact® Strep Positive Controls
Phadebact® Pneumococcus Test
Phadebact® Haemophilus Test
Phadebact® GC Positive Controls
Phadebact® CSF Test
Phadebact® CSF Positive Controls
Phadebact® Extraction Solutions
Phadebact® Monoclonal GC Test
Phadebact® ETEC-LT Test
Phadebact® Salmonella Test
Phadebact® Staph Aureus Test

Near Patient Testing

Phadirect® Strep A
Phadirect® Rapid CRP Test

Pour d'autres langues: www.mkldiagnostics.com

For other languages: www.mkldiagnostics.com

Für andere Sprachen: www.mkldiagnostics.com

Para otros idiomas: www.mkldiagnostics.com

Per altre lingue: www.mkldiagnostics.com

Andre sprog, se venligst: www.mkldiagnostics.com

Για άλλες γλώσσες: www.mkldiagnostics.com

På andra språk: www.mkldiagnostics.com